

Der Versand von Proben darf nur in geeigneten Transportbehälter erfolgen!

Für Proben, deren Transport gekühlt oder gewärmt stattfinden soll, werden geeignete Behälter zur Verfügung gestellt.

Transportbehälter können Sie unter Tel.: 0941 / 944 6211 UKR intern: 6211 anfordern.

1 Proben ohne präanalytischen Vorgaben

Für den Versand müssen Proben in flüssigkeitsdichten, verschließbaren Versandtüten verpackt werden.

UKR intern: Die Versandtüten können über das Zentrallager bestellt werden.

Notfall- und lebensbedrohliche Anforderungen mit der Rohrpost ins Labor schicken.



2 Proben mit präanalytischen Vorgaben

- ✓ Anforderung des passenden Versandbehälters (gekühlt bzw. gewärmt) im Labor unter Tel. 0941 / 944 6211
UKR intern: 6211
- ✓ Labor schickt Versandbehälter
UKR intern: per KFA auf entsprechende Station
- ✓ Sofortige Blutabnahme



- ✓ Entsprechendes Röhrchen in den Versandbehälter
- ✓ Versandbehälter in Styroporbox und mit Gummi verschließen
- ✓ unmittelbarer Versand
UKR intern: mittels KFA (Ziel 3341) ins Labor